





DREI Platform



DREI PLATFORM

ТЕХНОЛОГИИ:

Емкостная радиочастота 1 МГц Ультразвуковая кавитация 40 кГц Электропорация

Аппликаторы:

1 аппликатор для RF с тремя насадками:

- Биполярная для лица
- Биполярная для тела
- Монополярная для тела

1 плоский аппликатор для кавитации и электропорации

1 вогнутый аппликатор для кавитации и электропорации





ТЕХНОЛОГИИ

- Электропорация
- Радиочастотное воздействие
- Кавитация





РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ



ЧАСТОТА СЕАНСОВ

Курс обычно состоит из 10-12 сеансов, с частотой 1 или 2 раза в неделю.

После завершения процедур, рекомендуется приступить к поддерживающему лечению, чтобы улучшить и сохранить полученные результаты.



DREI Platform:

РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПИСАНИЕ





RF НАСАДКИ

Единственное на рынке устройство, оснащенное циркониевыми насадками.

Благодаря использованию циркония, насадки имеют оптимальный уровень изоляции (внутреннее тепло, безопасность кожи)

- Максимальная эффективность (большая глубина)
 - Полная безопасность: Отличная термо- и электроизоляция:
 - Большая долговечность Отсутствие карбонизации Отсутствие химической коррозии

Изоляция (цирконий)

- Биосовместимые


RF НАСАДКИ






БИПОЛЯРНАЯ НАСАДКА

Биполярная насадка имеет более поверхностное действие и предназначена для ухода за кожей лица или лечения изменений поверхностных тканей, таких как целлюлит, дряблость или растяжки.

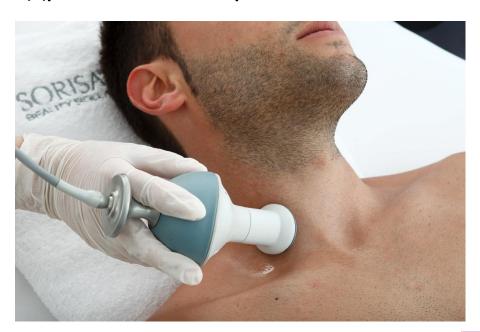


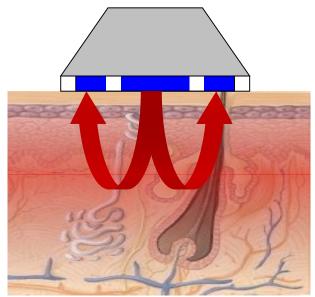



МОНОПОЛЯРНАЯ НАСАДКА

Монополярная насадка имеет глубокое действие и предназначена для воздействия на локализованное ожирение, целлюлит или растяжение мышц.

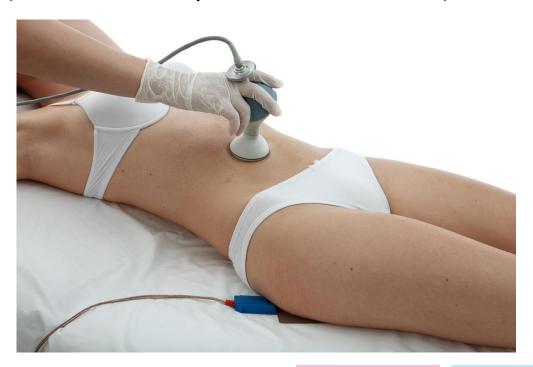



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ:



Масло для ухода	Основные активные компоненты	Эффект
ESSENTIAL AGE	ЖожобаОлигопептидыРетинол	Питательный эффектЭффект ботоксаЭксфолиант
ESSENTIAL CONTOUR	ФукусВит. С, β-каротинЙод	ДренированиеАнтиоксидантРегенератор клеток
ESSENTIAL FIRMING	Гулулу (мирра)ШиповникИкра	Повышение упругостиРегенерация тканейПитание клеток

• 250 мл достаточно для 120 сессий по телу курсов по телу или 360 сессий по лицу



DREI Platform

РАДИОЧАСТОТА ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ







- Женщина, 50 лет
- Монополярная насадка
- 8 процедур

Dra. Emilce Insua





- Женщина, 50 лет
- Монополярная насадка, интенсивность 70-90%
- 8 процедур

Dra. Emilce Insua





- Женщина, 45 лет
- Биполярная насадка
- 8 процедур

Dra. Emilce Insua





- Женщина, 68 лет
- Предустановленная программа «Морщины»
- 10 процедур






- Женщина, 53 года
- Предустановленная программа «Морщины»
- 10 процедур






- Женщина, 53 года
- Предустановленная программа «Морщины»
- 10 процедур

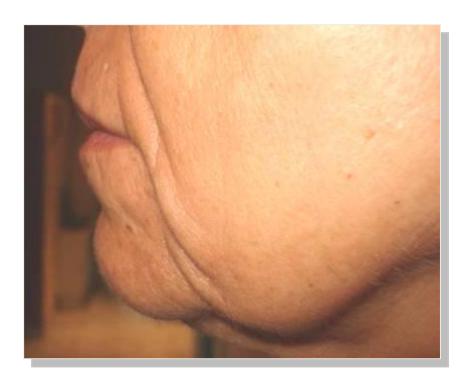



- Женщина, 59 лет
- Предустановленная программа «Дряблость»
- 3 процедуры

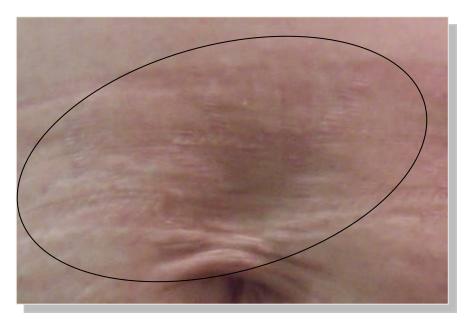



- Женщина, 34 года
- Предустановленная программа «Дряблость»
- 12 процедур, уменьшение объема 7 см

Marta Borràs





- Женщина, 55 лет
- Предустановленная программа «Дряблость»
- 24 процедуры

Marta Borràs



КАВИТАЦИЯ



ЭФФЕКТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ 40 kHz

Ультразвук 40 КГц показан при локальных жировых отложениях и целлюлите благодаря общему действию различных механизмов, среди которых:

- увеличение проницаемости мембраны жировых клеток
- улучшение циркуляции крови и местного дренирования
- высвобождение норадреналина



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ КАВИТАЦИИ

- Локальные жировые отложения
- Целлюлит
- Моделирование силуэта



ВРЕМЯ И ЧАСТОТА ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАННОГО НА КАВИТАЦИИ

Мы рекомендуем делать 10 процедур 1-2 раза в неделю.

После завершения процедур, рекомендуется приступить к поддерживающему лечению, чтобы улучшить и сохранить полученные результаты.



ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕЛЕЙ



ГЕЛЬ ДЛЯ УХОДА

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ЭФФЕКТ

GEL G5

Карнитин Различные водоросли Хвощ Ускоряет процесс потребления жиров Микроциркулирующая стимуляция

TONEACTIF GEL

Растворимый коллаген Гидролизированный эластин Экстракт пшеницы Укрепляющий и увлажняющий эффект Упругость

Антивозрастной и противоморщинный эффекты

• 1,000 мл. позволяют осуществить 15-20 сессий, состоящих из 15-20 сеансов



ПОКАЗАНИЯ К ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ:

- Локальные жировые отложения
- Целлюлит
- Моделирование силуэта
- Дряблость



DREI Platform

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КАВИТАЦИЯ + ЭЛЕКРОПОРАЦИЯ





ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ



1. Кавитация и Электропорация

2x (15 to 30 min)



2. Прессотерапия (дренаж)

20 min.



Женщина, 42 года 10 сеансов



Уменьшение объема : талия 6 см, бедра 5 см.

TUBODY of Castelldefels (Barcelona)



Улучшено качество кожи и уменьшен объем жировых отложений

TUBODY of Castelldefels (Barcelona)





Мужчина, 34 года 5 сеансов



Уменьшение объема: 2 см (живот), 3.5 см (талия)

TUBODY of Castelldefels (Barcelona)





Женщина, 45 лет 10 сеансов



Уменьшение объема: 2 см (живот)

TUBODY of Castelldefels (Barcelona)





Улучшено качество кожи и тонус тканей.

TUBODY of Castelldefels (Barcelona)





Женщина, 30 лет 6 сеансов



Уменьшение объемов: талия 4,5 см, бедра 3,5 см TUBODY of Castelldefels (Barcelona)



Женщина, 45 лет 4 сеанса



Уменьшение объемов: живот 8 см TUBODY of Castelldefels (Barcelona)



ОПИСАНИЕ



DREI PLATFORM

Комбинация трех методик:

Емкостное радиочастотное воздействие 1МГц Ультразвуковая кавитация 40 КГц Электропорация

Аппликаторы:

1. Один аппликатор для радиочастотного воздействия (с 3 насадками):

Биполярная насадка для ухода за кожей лица Биполярная насадка для ухода за телом Монополярная насадка для ухода за телом

1 плоский аппликатор для УЗ кавитации и электропорации

1 вокнутый аппликатор для УЗ кавитации и электропорации



КАВИТАЦИОННЫЙ ЗОНД

Интеллектуальные насадки с TEXHOЛOГИЕЙ SMARTCAV со следующими командами:

+ ИНФОРМАЦИЯ передается оператору посредством импульсных

вспышек

и вибросигналов:

- 1. Информация о мощности кавитации и электропорации
- 2. Индикация о достаточности контакта
- 3. Окончание лечения (вибросигнал)



- 1. Излучение производится только при достаточном контакте
- 2. Учитывается только реальная продолжительность процедуры
- 3. Нет необходимости в педали, так как присутствует механизм обнаружения достаточного контакта
- 4. Счетчик времени считывает реальное время воздействия





КАВИТАЦИОННЫЙ ЗОНД

- + ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Выполняет поиск резонансной частоты:
 - 1. Предотвращает перегревание насадки
 - 2. Максимальная эффективность

+ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря механизму обнаружения достаточного контакта





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ









ЭРГОНОМИЧНОСТЬ НАСАДОК

- Удобный дизайн для комфортабельной работы
- Простота в использовании многочисленных форм захвата и углов наклона позволяет легко обрабатывать различные зоны воздействия.




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЕЧЕНИЯ:

Предустановленные и свободные программы:

- 5 предустановленных программ по телу, 5 зон и 3 уровня
- 3 предустановленные программы по лицу



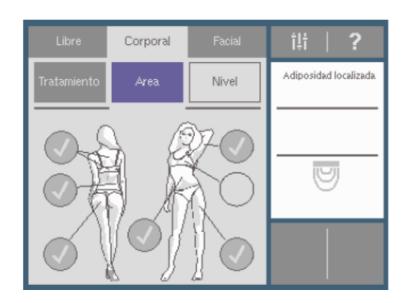



КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ С КОСМЕТИКОЙ:

- GEL G5 антицеллюлитный and ToneActif GEL

повышающий тонус

- Эссенциальные масла







DREI Platform ПРОЦЕДУРЫ



ПРОЦЕДУРЫ ПО ТЕЛУ

- Локальные жировые отложения
- Целлюлит
- Дряблость/провисание кожи
- Шрамы и растяжки
- Мышечная релаксация











Рекомендованный курс: 10 процедур (1 или 2 раза в неделю)



ЛОКАЛЬНЫЕ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛЛЮЛИТ

1) РАДИОЧАСТОТА:

- Разжижает жировую ткань
- Повышает васкуляризацию

2) КАВИТАЦИЯ И ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ

- Устраняют жировые отложения
- Улучшают проникновение активных веществ
- **3) ОРГАНИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТ ВАЗОДИЛАТАЦИЮ**, чтобы вывести шлаки и доставить питательные вещества к коже.





ПРОВИСАНИЕ КОЖИ - РАСТЯЖКИ


1) Радиочастота:

Разогрев дермы

- Высвобождение БШТ
- Повышение васкуляризации

2) Электропорация

- Улучшение проникновения активных веществ

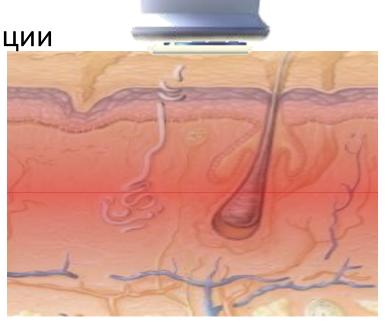




МОРЩИНЫ – ДРЯБЛОСТЬ – ШРАМЫ


Емкостное РЧ воздействие позволяет повысить температуру в слое дермы в избирательном и безопасном режиме и запустить восстановительный механизм:

- Переработка старого коллагена

- Стимуляция фиробласта

- Увеличение вазодилатации

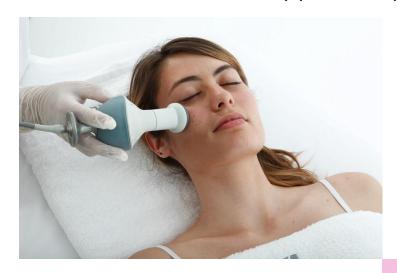

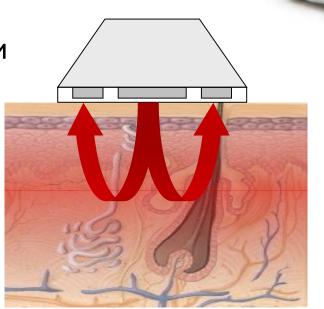



ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

- Морщины
- Дряблость/Провисание кожи
- Морщины







Лечение рассчитанно на 10 сеансов (1-2 раза в неделю)



DREI Platform РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИОВОЛНА + КАВИТАЦИЯ



+







Женский живот 10 процедур -6 см





Женский живот 10 процедур -6 см






Улучшено качество кожи, повышена упругость





Женский живот 10 процедур -4 см



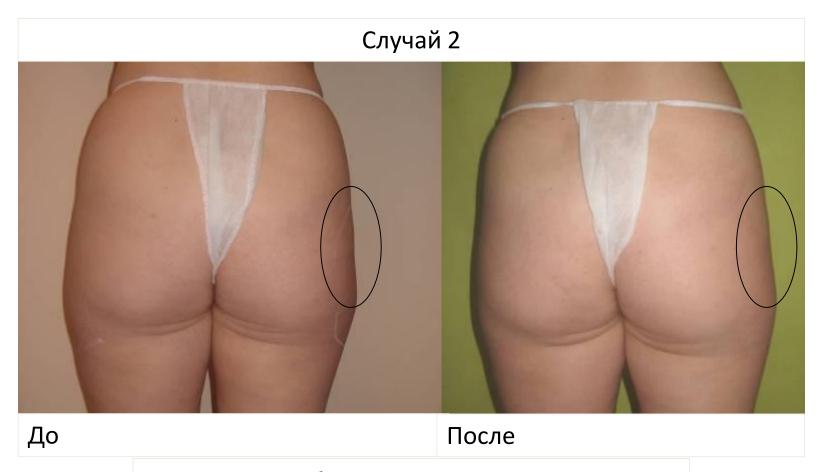

Женские бедра 6 процедур -3 см





Женский живот 8 процедур -5 см





Женские ягодицы 7 процедур

Улучшено качество кожи, повышена упругость





Спасибо!